


# DNA-näytteenotto

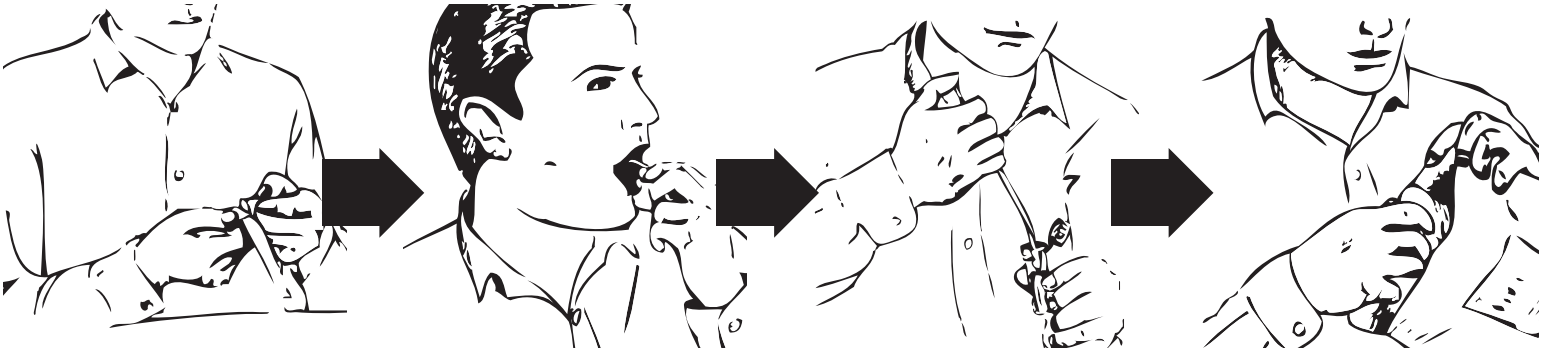

## HUOM! Lukekaa koko sivu ennen näytteen ottamista.

Kaavinta tehdään ennen syömistä tai juomista tai vähintään tunnin kuluttua syömisen tai juomisen jälkeen. Vältä lämpimiä tai kuumia nesteitä ennen kaavintaa.

- 1** Toimitamme 3 näytepuikkoa ja –putkiloa, jotta varmistamme tarkkuuden. Putkilossa olevan numeron tulee olla sama kuin julkaisuluvassa ja muovipussissa.
- 2** Avaa muovinen kääre varovasti puhtain käsin rikkomatta näytepuikkoa. Säilytä muovipussi, jossa on näytenumerosi, jotta voit laittaa putkilot takaisin siihen sen jälkeen kun näytteet on otettu.
- 3** Käytä yhtä kaavinta kerrallaan ja kaavi voimakkaasti posken sisäpintaa monta kertaa (n. 60 sek. ajan). Mitä voimakkaampi kaavinta sitä parempi näyte!
- 4** Ota esille yksi pieni näyteputkilo, jossa on merkittynä näytteesi numero. Kierrä korkki auki ja työnnä näytepuikko varovasti putkeen saippuaiseen liuokseen saakka ja paina varovasti puikon päässä olevaa paininta. Näin saat irrotettua kaavinosan putkiloon. Puikkoa ei saa työntää pohjaan asti.
- 5** Poista muovinen varsi ja jätä kaavinosan putkeen. Kierrä putkilon korkki tiukasti kiinni. Korkin täytyy olla tiivistä kiinni, niin että näytteen laatu säilyy hyvänä.
- 6** Odota vähintään 3-4 tuntia ennen kuin toistat vaiheet 3-5 käyttäen toista kaavinta. Otettuasi toisen näytteen odota jälleen 3-4 tuntia ennen kuin toistat samat vaiheet kolmannen näytepuikon kanssa.
- 7** Laita näyteputkilot takaisin muovipussiin, jossa on näytenumerosi ja sulje se. Laita muovipussi ja julkaisulupa mukana lähetettyyn valmiiksi osoitteella varustettuun kirjekuoreen ja lähetä DNA-näytteet takaisin USA:han. Jos näytettä ei ole vielä maksettu, niin shekillä maksaessanne kirjoittakaa siihen sekä näytteen ETTÄ laskun numerot. Tämä varmistaa sen, että näyte ja maksu kohdistuvat oikein.